

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE AMONIO y ÁCIDO LÁCTICO, ÁCIDO PIRUVICO Y CUERPOS CETÓNICOS

- Grupo muscular relajado.
(del brazo donde se realiza la extracción)
- Extracción sin torniquete.
(retirar el torniquete una vez localizada la vena, desechar primera fracción)
- Conservar la muestra en frío.
(baño de hielo)
- Remitir inmediatamente al laboratorio.


AMONIO




Tubo de EDTA
(tapón morado)

Poner en **baño de hielo**

LACTICO, PIRÚVICO Y CUERPOS CETÓNICOS

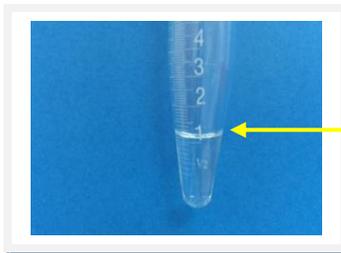

Tubos que contienen **1 ml**
de ácido perclórico

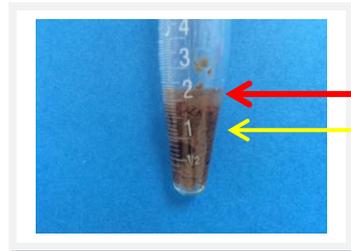

Añadir
exactamente 1 ml
de sangre total



Tapar con parafilm
Invertir varias veces
Poner en **baño de hielo**